

Etac Handy

Ett stabilt vägghandtag med många användningsområden

Handy ger trygghet och stabilitet vid toalett- och badrumsbesök. Det är designat för att passa in i alla miljöer och materialen är framtagna för att minimera risken att halka.

Ett säkert grepp

Den dolda skruvfästningen och den ergonomiska utformningen ger en trygg och behaglig känsla. Den aluminiumförstärkta konstruktionen gör att Handy tål mycket stora belastningar, upp till 160 kg.

Handys inlägg av mjukt antihalkmaterial ger ett säkert grepp. Handy finns i olika längder, både raka och vinklade, för att passa alla behov.

Limma vägghandtag i badrum.

Slipp vattenskador!

Alla fastighetsbolag vill minska håltagning i badrum. Etac och EB Solution har lösningen så du slipper borra i kakel när du sätter upp vägghandtaget Handy från Etac.

En adapter, som består av en rostfri platta med gängade hål limmas först upp på kaklet. Sedan skruvar du fast handtaget i plattan med de korta skruvarna.

Vi rekommenderar inte att limma på kakel som är av äldre datum utan att först ha kontrollerat att kakel och fogmassa är av god kvalitet. Diskutera med fastighetsägaren innan om du är osäker.

När du vill ta bort handtaget så "sågar" du genom limfogen med en pianotråd, och tar sedan bort limresterna med en rakbladsskrapa.


Klart! Inga hål efter vägghandtaget.

Limmet har mycket god hållfasthet. Vi använder två miljövänliga lim, Cascos SuperFix eller Loctite 5616.



Handtag med förmonterad adapter beställs från EB Solution.

För mer teknisk information kontakta EB Solution AB,
Sallarängsgatan 3
431 37 Mölndal
Telefon: 031-27 37 00
Mobil: 0705-81 81 50
E-post: urban@ebsolution.se

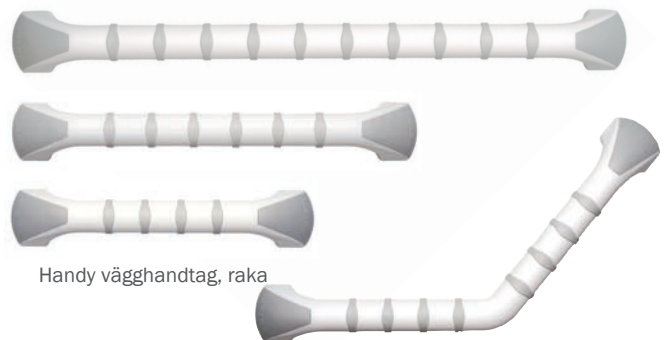

Handy vägghandtag, raka

Handy vägghandtag, vinklad

Vägghandtag Etac Handy

Artikel nr.

Handy, rak, 30 cm	80210040
Handy, rak, 40 cm	80210042
Handy, rak, 60 cm	80210044
Handy, vinklad, 40 cm	80210046

Skrudar/fästelement ingår ej.

Max användarvikt 160 kg

Material Polypropylen, Aluminiumrör innanför

Design Producerad av Gordon Ellis

Underhåll



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning. Produkten kan även rengöras på ett säkert sätt i tvättkåp vid 85° C i 3 minuter.